



+ PDI®

物表消毒湿巾



A Mission 一种使命

对抗医院感染HAI，让更多的患者能够安心出院，是我们共同的使命。

在过去的五十多年中，PDI与医疗专业人士合作，通过提供先进的产品和全面的解决方案，一同挽救生命。



旗下品牌

Prevantics®

SANI-HANDS®
Instant Hand Sanitizing Wipes

SANI-CLOTH®
GERMICIDAL DISPOSABLE WIPE



我们，发明了消毒湿巾

1963 世界第一片酒精擦片

1988 世界第一张消毒湿巾

1/3

制造全世界1/3的湿巾

>80%

在美国医疗领域的市占率>80%

22亿美金

2017年营业额约为22亿美金(140亿人民币)



学术合作

我们与顶尖的机构合作, 在感控的最前线冲锋。



HEALTH INDUSTRY
DISTRIBUTORS
ASSOCIATION



切断传播途径是关键

高频接触表面中, 有70%没有被有效清洁

改善环境表面的清洁与消毒质量, 可以降低HAI的发生率



实验证明 使用PDI消毒湿巾有效降低HAI

Project: Clean Sweep Reducing Healthcare-associated Infections, Employee Absenteeism, Healthcare Cost and Hospital Readmissions in a Long Term Care Facility

制订并实施表面消毒湿巾和手部消毒湿巾的标准方案，医院各个位置都配备了墙面托架和地板支架，也放置于药物推车、病房服务车等地方。

有效减少HAI，节省人员作业时间，降低医疗成本和再入院率




Presented at the 37th Annual Meeting of the Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology; July 11 - 15, 2010; New Orleans, LA. Abstract 8-080

The Role of Education and Point of Care Use in Appropriate Surface Disinfection Compliance

在便利的取用点摆放消毒湿巾，定期的教育培训和张贴教育海报，针对不同设备表面，选择不同的消毒湿巾

增加使用消毒湿巾的依从性，降低了多重耐药菌的患病率

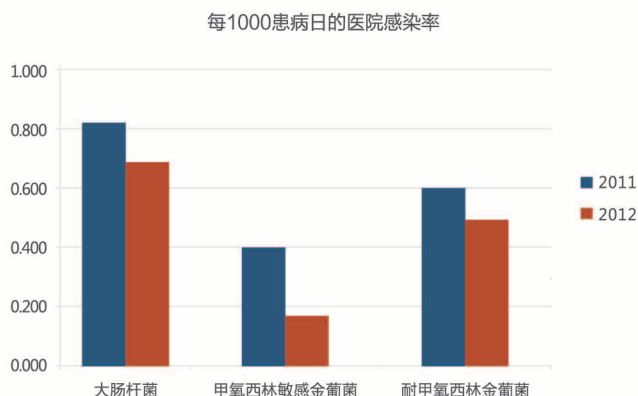

Presented at the Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology Annual Conference 2013



Super含醇型

可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见细菌、结核杆菌

- 复合季铵盐+异丙醇成分
- 可杀灭TB结核杆菌
- 迅速消毒，周转快
- 作用时间*：2分钟



※作用时间：从湿巾接触到物体表面开始计算，此时间内表面不被干扰且保持湿润，并非持续擦拭时间



杀菌效果强

通过美国EPA认证
经中国权威CDC检测



所需时间短

美国检测报告
30秒即可杀灭病毒



成份有效析出

有效成分不被湿巾吸附
用挤出液作测试而不是
用原液



兼容性高

不腐蚀不伤仪器
擦拭后不留痕迹



依从性佳

随抽随用省时间
湿巾大小合手有效施力



开盖后有效期长

特殊双层上盖
密封效果好



AF3无醇型

可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、
医院感染常见细菌

- 复合季铵盐成分
- 无气味，不刺激
- 适用于对酒精敏感的物品表
- 可用于超声探头的清洁与消毒
- 作用时间*：3分钟



Bleach含氯型

可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、
医院感染常见细菌、结核杆菌、可灭活病毒

- 含6000ppm有效氯
- 可达到中水平消毒
- 灭活病毒、可杀灭TB结核杆菌
- 美国检测, 可杀灭C.Diff艰难梭菌孢子、诺如病毒
- 适用于高风险区域
- 作用时间*：4分钟



如何使用



1.由湿巾卷的中心抽断一张,将断口处的湿巾拧成细束穿上盖的孔,拉出3公分左右,将上盖盖回,即可开始使用。



2.用手半遮掩开口,朝着远离眼脸部的方向,以45度角抽出湿巾。



3a.当有可见污物时,先清洁后消毒,先用第一张湿巾擦除表面污物,再用第二张湿巾擦拭达到消毒效果。



3b.若无可见污物,则只需要用一张湿巾擦拭,由上而下,由里到外,由轻度污染到重度污染。



4.擦拭后的湿表面必须保持充分湿润达X分钟。让擦拭过的表面在空气中自然晾干。



5.湿巾不可以重复使用。单次使用后即丢弃于垃圾桶中,不可丢弃于抽水马桶中。


注意事项

- 操作时依医疗机构规定,穿戴个人防护用品
- 不得将湿巾翻面或折叠使用
- 不使用时,保持上盖盖子关闭以防止蒸发
- 同张湿巾不可跨清洁单元使用,避免交叉污染




适用范围

- 医疗保健机构中的非多孔的硬质表面(木头、塑料、不锈钢), 如监护仪、呼吸机、治疗车、病床栏杆、桌子、座椅、电话、马桶座垫、血糖仪、听诊器、手术床和手术灯、新生儿暖箱、超声波探头等。
- 消毒面积: 1-2平方米, 根据表面材质会有所不同

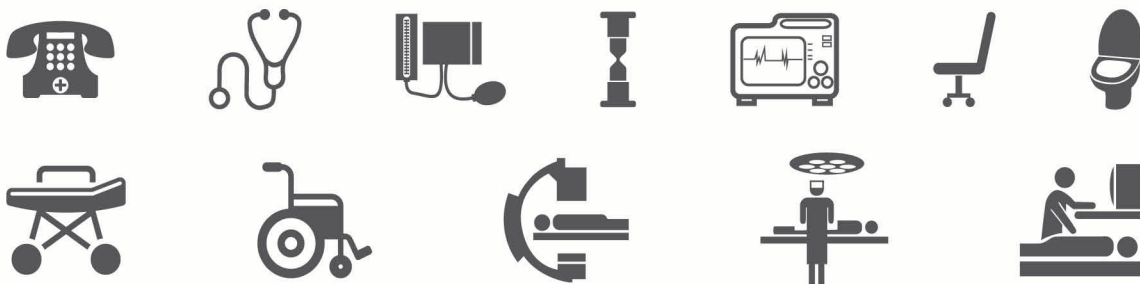

我们深知不同科室各有其独特需求和预防重点, 不存在可以应用于所有情况的“万能湿巾”

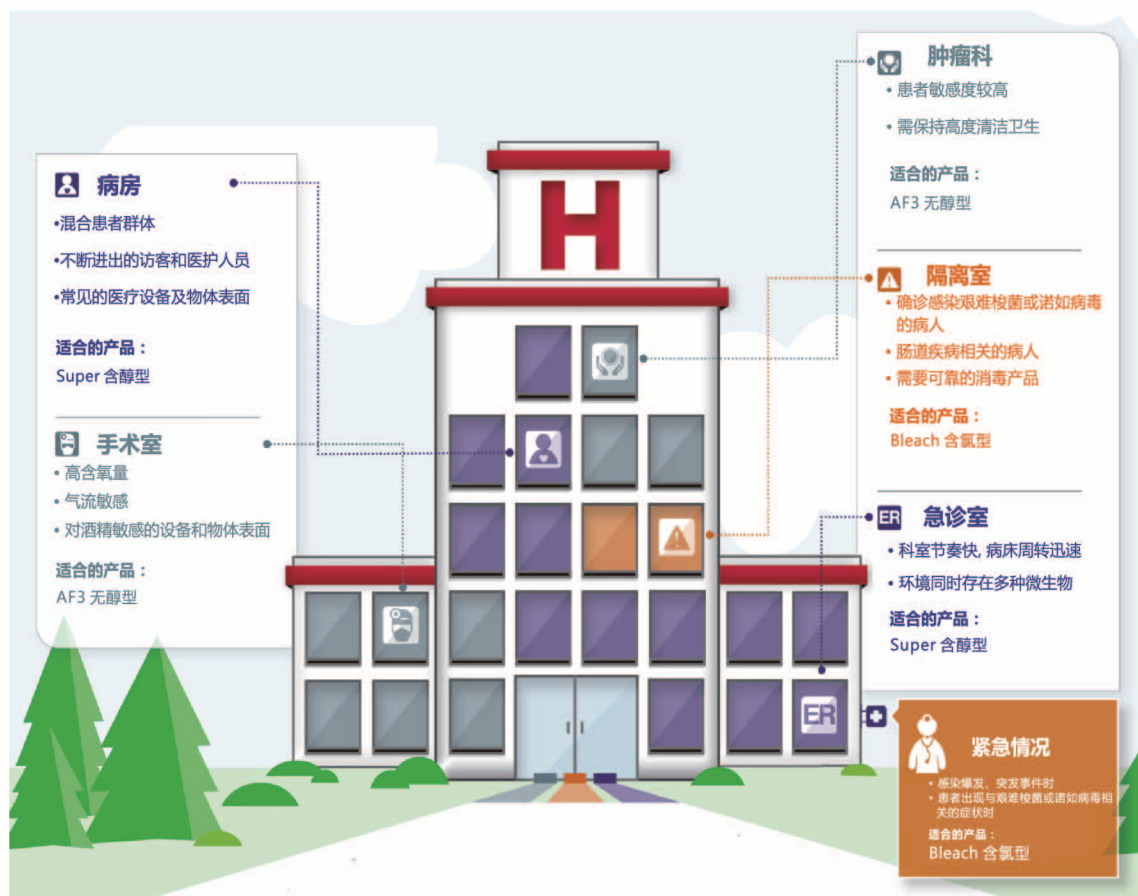

产品订购信息

	订购号	湿巾尺寸	包装
Sani-Cloth® AF3 物表消毒湿巾-无醇型			
大罐	P13872	15×17厘米	160/罐, 12罐/箱
超大罐	P63884	19×38厘米	65/罐, 6罐/箱
轻便包	M928S80	21×25厘米	100/包, 9包/箱

Super Sani-Cloth® 物表消毒湿巾-含醇型			
大罐	Q55172	15×17厘米	160/罐, 12罐/箱
超大罐	Q86984	19×38厘米	65/罐, 6罐/箱

Sani-Cloth® Bleach 物表消毒湿巾-含氯型			
大罐	P54072	15×27厘米	75/罐, 12罐/箱
超大罐	P25784	19×38厘米	65/罐, 6罐/箱
大盒(单片装)	H58195	13×18厘米	40/盒, 10盒/箱

Sani-Hands® 手部卫生湿巾			
中罐	P13472	15×19厘米	135/罐, 12罐/箱
大罐	P15984	15×19厘米	220/罐, 6罐/箱
大盒(单片装)	D43600	13×20厘米	100/盒, 10盒/箱

相关配件

帮助医疗人员更有效地完成他们的工作，促进机构的合规性，达到法规和认证要求。



三合一通用支架

安装罐在墙壁/设备上，方便取用。
明显的标签，识别不同产品



轻便包固定支架

将轻便包固定在移动设备上，方便
随时使用。



杆配件

安装支架在杆子上。
需另买三合一通用支架。



多桶式落地支架

放置在入口等人流量大的地方。
可容纳5罐。



设备配件

安装支架在特定设备上。
需另买三合一通用支架。
(订购前请确认适配款式)



随身组合包

方便随时进行消毒。还可放置个人
防护装备，如手套和口罩。



罐托

用于放置在工作台面、护理站等
平面上。
明显的标签，识别不同产品。



设备标签

可黏于设备上，帮助识别干净/污
染的设备，确保使用正确合适的产
品。容易去除，不留下任何粘性残
留物。



微信公众号pdi_cn

碧谛艾医疗器械(上海)有限公司



400-6111-734



www.pdihc.cn